

ADVATx[®]

L'AVENIR DE LA
REJUVENATION DE LA PEAU



calista
medical

WWW.CALISTAMEDICAL.CH

 @calistamedical_ch



DESCRIPTION

L'AVENIR DE LA REJUVENATION DE LA PEAU

ADVATx est la technologie de base indispensable dans toutes les cliniques médico-esthétiques pour rajeunir la peau et traiter l'acné. Elle combine les longueurs d'onde du jaune (589 nm) et de l'infrarouge (1319 nm) en un seul traitement, exploitant ainsi l'effet de synergie entre les deux longueurs d'onde pour un traitement idéal. ADVATx dispose de deux protocoles de traitement spéciaux, ADVAClear et ADVABright, qui permettent à l'utilisateur d'aborder la réjuvenation de la peau, l'acné et plus encore de manière sûre et cliniquement efficace.

La combinaison des énergies laser du jaune (589 nm) et de l'infrarouge (1319 nm)

POINTS CLÉS

Bien qu'ADVATx soit l'un des lasers dermatologiques les plus sophistiqués au monde, il est également l'un des plus faciles à utiliser. Une interface intuitive sans consommables coûteux.

- Excellents résultats cliniquement prouvés immédiatement après le traitement pour toutes les indications
 - Délégable
 - Extrêmement sûr
 - Pas de frais courants
 - Système silencieux
 - Pas besoin d'anesthésie
 - Pas de temps d'arrêt
- En cas de rosacée, d'acné, de cicatrices d'acné et d'anomalies vasculaires indésirables comme les télangiectasies, les hémangiomes et les lacs veineux, la dyschromie, la peau abîmée par le soleil, les ridules, la peau grasse et les pores dilatés

FONCTIONNEMENT ET TECHNOLOGIE

UNE TECHNOLOGIE QUI FAIT PASSER VOTRE PRATIQUE ESTHETIQUE AU NIVEAU SUPERIEUR

Le système ADVATx vous permet de répondre à la demande croissante de procédures esthétiques et dermatologiques avec une seule plateforme polyvalente.

SOFT PULSING

Le Soft Pulsing génère un train d'impulsions nanosecondes; par exemple, une impulsion de 20 ms est composée d'impulsions de 240 ns. L'intervalle entre les impulsions permet à la chaleur de se diffuser, ce qui entraîne une augmentation progressive de la température cible tout en préservant les tissus environnants, sans provoquer de purpura. La fenêtre thérapeutique est beaucoup plus large que celle des lasers à impulsion unique, ce qui permet de ne pas avoir besoin de refroidir la peau. ADVATx, avec son intelligence clinique et son interface utilisateur intuitive, a été conçu dans l'optique d'une utilisation simple.



PROFONDEUR DE PENETRATION

ADVATx exploite l'effet de synergie entre deux longueurs d'onde, 589 nm et 1319 nm, en combinant la longueur d'onde de prédilection pour éliminer les anomalies vasculaires et les troubles de la pigmentation épidermique avec la nouvelle référence pour le resurfaçage non ablatif au sein d'une même séance de traitement. La longueur d'onde de 589 nm pénètre à 1 mm de profondeur dans les tissus, tandis que celle de 1319 nm atteint 2 mm – plus profondément que n'importe lequel des lasers non ablatifs habituellement utilisés. Et ce, sans le temps de convalescence ni les douleurs habituellement associés aux traitements de ce type.




La combinaison des énergies laser du jaune (589 nm) et de l'infrarouge (1319 nm) élimine **la rosacée, l'acné, les cicatrices d'acné et les anomalies vasculaires indésirables comme les télangiectasies, les hémangiomes et les lacs veineux**, et redonne à la peau un aspect plus sain et plus jeune.







La combinaison des énergies laser du jaune (589 nm) et de l'infrarouge (1319 nm) améliore le teint de la peau, la texture qui cible l'hémoglobine et la **dyschromie** qui apparaît sur les **peaux abîmées par le soleil**, tout en réduisant les **ridules**, en limitant la **production de sébum** et en resserrant les **pores**.

RESULTATS

avant & après le traitement

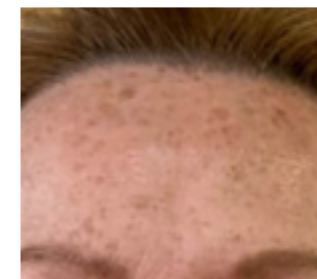

avant & après le traitement

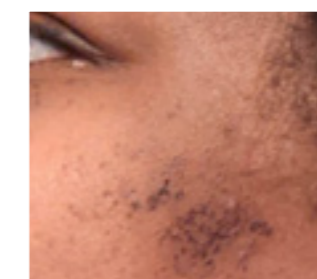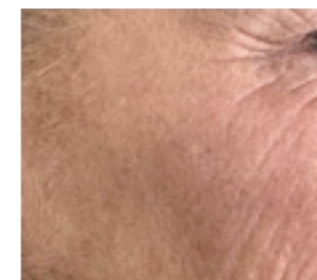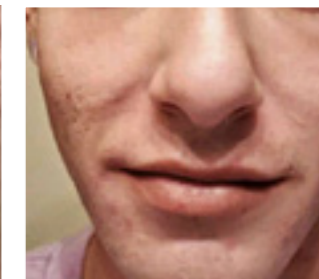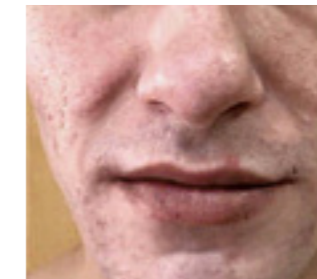

ADVATx[®]

La combinaison des énergies laser du
jaune (589 nm) et de l'infrarouge (1319 nm)

ADVATx est la technologie de base indispensable dans toutes
les cliniques médico-esthétiques pour rajeunir la peau
et traiter l'acné.

calista
medical

Calista GmbH | Altweg 12 | 8500 Frauenfeld
Tel: +41 43 233 73 73 | Fax: +41 43 233 73 50
info@calistamedical.ch | www.calistamedical.ch